

Manuel d'utilisation du masque CONFORT

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions pour vous assurer du bon fonctionnement et en particulier des mises en garde.

Table des matières

Principe de fonctionnement	2
Contenu	2
Champ d'application	2
Préparation à l'utilisation.....	2
Charge	3
Temps de service.....	3
Boutons de commande	3
Bluetooth	4
Précautions d'emploi.....	4
Dépannage et Maintenance	5
Défauts courants et solutions	5
Entretien et nettoyage.....	5
Transport, entreposage, spécification et caractéristiques	5

Principe de fonctionnement

Le masque est basé sur les principes de la science des Méridiens et de la médecine traditionnelle chinoise. Il agit sur les yeux par pression d'air piloté via une électronique. Il aide à l'oxygénation des yeux et élimine l'obstruction des méridiens. Les fonctions de chaleur, les vibrations et le massage améliorent la circulation sanguine accélèrent le métabolisme pour maintenir les yeux en bonne santé. Avec sa fonction Bluetooth, le masque peut émettre de la musique pour aider les utilisateurs à se détendre et à stimuler le potentiel du cerveau.

1. Pression d'air intelligente : Sous la commande de l'électronique, la pression d'air agit sur les méridiens des yeux et du cerveau pour soulager la fatigue en massant d'importants points d'acupuncture de la zone des yeux.
2. L'élément chauffant en fibre de carbone maintient la température à 42 degrés centigrades pour améliorer la circulation sanguine et la capacité nutritionnelle des yeux, soulager les yeux secs et renforcer la peau efficacement.
3. Massage par vibration : Il accélère la circulation pour retrouver l'élasticité du corps ciliaire, améliorer la capacité de régulation du cristallin et soulager rapidement la fatigue de la zone des yeux en faisant vibrer les groupes musculaires des yeux.
4. Le masque peut détendre tout votre corps tout en prenant soin de vos yeux en utilisant une connexion Bluetooth via un téléphone portable pour diffuser de la musique.

Contenu

La boîte de ce produit a été spécifiquement étudiée pour protéger le produit durant le transport et aussi assurer son entreposage pour de longue période d'inutilisation. Nous vous recommandons de la conserver. Elle pourra vous servir pour :

- Nous renvoyer le produit en cas de problème durant la période de garantie.
- Entreposer le masque en sécurité

Champ d'application

En utilisant le massage, le produit peut soulager la fatigue des yeux et prévenir la myopie.

Le produit s'applique aux :

- Elèves des écoles primaires, collèges et universités.
- Personnes qui portent des lunettes depuis longtemps.
- Opérateurs informatiques, comptables, concepteurs, secrétaires, enseignants
- Personnes qui utilisent les yeux continuellement depuis longtemps.
- Insomniaques
- Personnes qui ont des poches et/ou des cercles noirs sous les yeux.

Préparation à l'utilisation

Le masque dispose d'une batterie rechargeable intégrée. Veuillez le charger pour son utilisation.

Charge

- Le masque ne fonctionne pas correctement lorsque la capacité de la batterie est faible. Veuillez l'utiliser après recharge.
- Après la charge complète, veuillez débrancher l'adaptateur secteur.
- Ne charger pas les batteries trop longtemps afin de prolonger la durée de vie du produit.
- Branchez l'appareil sur l'adaptateur secteur via le connecteur USB.
- Le voyant lumineux est rouge pendant le chargement et il sera bleu une fois la batterie complètement chargée.
- Le produit ne peut pas être utilisé pendant le chargement. (Si le produit est chargé lorsqu'il fonctionne, il exécutera le processus d'autoprotection pour cesser de fonctionner automatiquement.)
- Le temps de charge d'environ 2-3 heures.
- Arrêter l'utilisation lorsque le produit vous indique que la batterie est faible par un message vocal. Utilisez-le après la recharge.
- Il existe plusieurs façons de charger le produit :
 - Via le port USB de l'ordinateur.
 - Via l'alimentation d'un chargeur standard muni de connecteur USB.
 - Via le chargeur standard (recommandé)

Temps de service

La durée d'utilisation par défaut est de **15 minutes**. Pour un temps d'utilisation plus long, veuillez redémarrer le masque.

Boutons de commande

NE DEMARRER PAS LE MASQUE SANS L'AVOIR MIS EN PLACE SUR VOTRE VISAGE

1. Touche marche-arrêt : c'est le bouton central avec un symbole de cercle
Appuyez pendant 3 secondes pour démarrer. Appuyez de nouveau pendant 3 secondes pour arrêter.
2. Touche mode : c'est le bouton le plus à droite avec l'inscription « mode »
En Fonctionnement, cliquez sur la touche de mode pour changer de mode. Il y a 5 modes que l'on peut sélectionner successivement par ce même bouton.
 - a. Pression + chaleur + music
 - b. Pression + vibration + music
 - c. Pression + chaleur + vibration + music
 - d. Pression + music
 - e. Chaleur + music
3. Boutons pour la musique (3 boutons). Le masque doit être connecté à un appareil Bluetooth pour lire de la musique.
 - a. Lecture/pause de la musique : cliquez sur ce bouton pour activer ou mettre en pause.
 - b. Bouton Précédent/Augmenter le volume : cliquez une fois sur la double flèche vers le haut pour lire le morceau précédent. Appuyez longuement pour augmenter le volume.
 - c. Bouton Suivant/Diminuer le volume : cliquez sur double flèche vers le bas pour lire le morceau suivant. Appuyez longuement pour baisser le volume.

Bluetooth

Une fois en fonction, le Bluetooth s'ouvre automatiquement.

- Activez le Bluetooth du téléphone ou autre appareil.
- Recherchez sur votre appareil source, le Bluetooth du casque.
- Associez le casque avec votre appareil.

Vous pourrez ensuite, écouter de la musique via la fonction audio de votre casque.

Remarque :

La connexion d'un Bluetooth pour la première fois nécessite une action manuelle sur votre téléphone. Si le produit est couplé avec votre téléphone avec succès, ils se connecteront automatiquement lors de la prochaine fois.

Précautions d'emploi

1. **NE DEMARRER PAS LE MASQUE SANS L'AVOIR MIS EN PLACE SUR VOTRE VISAGE** afin de ne pas endommager la surpression du ballon.
2. Fermer les yeux durant l'utilisation de ce produit. Au début et après utilisation, les yeux seront plus flous. Fermez les yeux 1-3 minutes pour éviter ce désagrément.
3. Ne pas l'utiliser dans un endroit chaud et humide.
4. Si vous avez subi une chirurgie oculaire ou avez du glaucome, un décollement de la rétine ou d'autres affections ophtalmologiques majeurs, l'emploi de l'appareil est fortement déconseillé. Prenez conseil auprès de votre médecin dans ce cas.
5. En cas d'AVC, d'hypertension ou les personnes hypotensives, utilisez-le avec prudence. Prenez l'avis de votre médecin.
6. En cas de gêne ou de malaise durant son utilisation, arrêtez de l'utiliser.
7. Pour les personnes ayant des problèmes ou retard mentaux, son utilisation devra se faire sous la surveillance d'un accompagnateur.
8. Évitez de l'utiliser lorsque vous buvez ou vous ne vous sentez pas bien.
9. Le masque a une fonction de compression à chaud. Les personnes insensibles à la température sont invitées à utiliser ce mode avec prudence.
10. Si vous portez des lentilles de contact, des épingles ou des ornements de cheveux, ils devront être enlevés avant d'utiliser l'appareil.
11. L'appareil est un produit de confort et ne peut pas remplacer les médicaments ou les équipements médicaux.
12. Pour le nettoyer, veuillez utiliser un chiffon doux imbibé d'alcool médical à l'exclusion d'autres produits de nettoyage.
13. Ne pas démonter ce produit par vous-même.

Dépannage et Maintenance

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, vérifiez les points suivants. Si le problème persiste, veuillez nous contacter pour réparation.

Défauts courants et solutions

Défauts	Cause possible	Solutions
Impossible de démarrer	Batterie faible	Charger la batterie
	Mise en protection	Si l'appareil est déjà chargé, débranchez-le du chargeur et attendre 5 secondes avant de le remettre en marche.
	La batterie ne charge pas	Essayez avec un autre chargeur.
La pression est trop faible	Batterie faible	Charger la batterie

Entretien et nettoyage

- Si le boîtier de l'appareil est sale, essuyez-le avec un chiffon doux et sec. S'il est particulièrement sale, le chiffon doux peut être imbibé alcool médical.
- Après utilisation, le produit doit être placé dans un endroit sûr. Des mesures doivent être prises pour éviter l'humidité, empêcher les souris et prévenir la pollution.
- En cas de problème, un technicien professionnel doit être invité à le réparer. Ne pas le démonter par vous-même.

Transport, entreposage, spécification et caractéristiques

- Pression atmosphérique d'utilisation : 86kpa à 106kpa
- Température d'utilisation : -10 °C à 65 °C
- Humidité relative d'utilisation : < 80% RH
- Utilisation dans une atmosphère non-corrosivité et un environnement intérieur bien ventilé.
- Transport : Il devra éviter la pluie, la neige et les chocs.
- Après une période de stockage de plus de six mois, chargez-le pendant une demi-heure.
- Evitez la lumière du soleil intense et la corrosion par des gaz corrosifs.
- Tension de charge : 5V DC / 4.5W